

# فحص سرطان القولون والمستقيم باستخدام اختبار Cologuard

## ما المقصود باختبار Cologuard®؟

يبحث اختبار Cologuard عن وجود علامات سرطان القولون في البراز. اختبار Cologuard هو فحص غير باضع. إنه سريع ويسهل إجراؤه في المنزل.

## ماذا يوجد داخل مجموعة جمع عينات اختبار Cologuard؟

ستتلقى مجموعة جمع عينات اختبار Cologuard عبر البريد.



ملصقات العينة



المجس + الأنبوب



زجاجة بها سائل  
(مادة حافظة)



حاوية جمع البراز



الحامل



تعليمات دليل المريض



صندوق الشحن

## كيف يمكنني استخدام مجموعة جمع عينات اختبار Cologuard الخاصة بي؟

1. قم بإخراج المجموعة من العبوة. اقرأ دليل المريض الموجود بداخل العبوة (الإنجليزية والإسبانية).
  - اضبط تذكير تقويم في هاتفك لإكمال مجموعتك في غضون أسبوعين
2. اجمع عينتك في الوقت الذي يمكنك فيه أخذها إلى UPS® في اليوم نفسه أو في اليوم التالي.
3. أرسل عينتك في نفس اليوم أو في اليوم التالي لجمعها.
  - حدد موعدًا لاستلام UPS مجانًا (بالاتصال على الرقم 1-844-870-8870 أو من خلال [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS)).
  - انقل مجموعتك إلى UPS. ابحث عن المتاجر وساعات العمل على [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS). بعض المتاجر تكون مغلقة أيام الأحد أو العطلات
4. يحصل مقدم الرعاية الصحية المتابع لك على نتيجتك بعد أسبوعين تقريبًا من استلام Exact Sciences Laboratories لعينتك.



شاهد فيديو كيفية استخدام Cologuard (متوفر بـ 13 لغة) امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو انتقل إلى [Cologuard.com/use](https://Cologuard.com/use)

## هل لديك أسئلة؟

يرجى زيارة [Cologuard.com](https://Cologuard.com) أو الاتصال بـ Exact Sciences Laboratories على الرقم 1-844-870-8870.

## دواعي استعمال اختبار Cologuard ومعلومات مهمة عن المخاطر

الغرض من اختبار Cologuard هو فحص البالغين بدءًا من عمر 45 عامًا فأكثر ممن لديهم احتمالية متوسطة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، عن طريق اكتشاف علامات معينة للحمض النووي مع وجود دم في البراز. لا تستخدم هذا الاختبار إذا كنت قد أصبت قبل ذلك بأورام غدية أو كنت مصابًا بمرض التهاب الأمعاء ومتلازمات وراثية معينة أو كان لديك تاريخ مرضي شخصي أو عائلي مرتبط بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم. لا يُعد اختبار Cologuard بديلاً عن إجراء تنظير القولون بالنسبة إلى المرضى المعرضين لمخاطر كبيرة. يتم تقييم أداء اختبار Cologuard لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عامًا بناءً على دراسة إكلينيكية كبيرة للمرضى الذين يبلغ عمرهم 50 عامًا فأكثر. ينبغي تفسير نتيجة اختبار Cologuard بحرص. فلا تؤكد نتيجة الاختبار الإيجابية الإصابة بالسرطان. ينبغي للمرضى الذين تكون نتيجة اختبارهم سلبية مناقشة طبيهم عندما يحتاجون إلى إجراء تنظير القولون. كما أن نتيجة الاختبار السلبية لا تؤكد عدم الإصابة بالسرطان. ينبغي للمرضى الذين تكون نتيجة اختبارهم سلبية مناقشة طبيهم عندما يحتاجون إلى إجراء الاختبار مرة أخرى. من الممكن الحصول على نتائج إيجابية زائفة وسلبية زائفة كذلك. في دراسة إكلينيكية، حصل 13% من الأشخاص غير المصابين بالسرطان على نتيجة إيجابية (إيجابية زائفة) وحصل 8% من الأشخاص المصابين بالسرطان على نتيجة سلبية (سلبية زائفة). بناءً على وصفة طبية فقط.