

Cologuard 검사로 대장암 선별검사하기

Cologuard® 검사란 무엇입니까?

Cologuard 검사는 대변(똥)에서 대장암의 징후를 발견합니다.
Cologuard 검사는 비침습적 선별검사입니다. 가정에서 빠르고 쉽게 사용할 수 있습니다.

Cologuard 채취 키트 안에는 무엇이 들어 있습니까?

Cologuard 채취 키트를 우편으로 받게 됩니다.



Cologuard 채취 키트를 어떻게 사용합니까?

1. 키트 포장을 풉니다. 안에 있는 환자 가이드(영어 및 스페인어)를 읽습니다.
 - 2주 이내에 키트를 완료하도록 휴대전화에 일정 미리 알림을 설정합니다
2. 당일 또는 다음 날 UPS®로 시료를 배송할 수 있도록 시료 채취를 계획하십시오.
3. 검체를 채취한 다음 날 또는 그 다음 날 검체를 보내십시오.
 - 무료 UPS 픽업을 예약하십시오(1-844-870-8870 또는 [Cologuard.com/UPS](https://www.cologuard.com/UPS)).
 - UPS로 키트를 가져가십시오. [Cologuard.com/UPS](https://www.cologuard.com/UPS)에서 매장과 영업시간을 확인할 수 있습니다. 일부 매장은 일요일 또는 공휴일에 휴무입니다.
4. 담당 의료 제공자가 Exact Sciences Laboratories가 귀하의 검체를 수령한 후 약 2주 시점에 귀하의 결과를 받을 것입니다.



Cologuard 사용 방법 동영상 시청(13개 언어)
QR 코드를 스캔하거나 [Cologuard.com/use](https://www.cologuard.com/use)로 이동하십시오

질문이 있으십니까?

[Cologuard.com](https://www.cologuard.com) 방문하거나 Exact Sciences Laboratories에 1-844-870-8870번으로 전화하십시오.

Cologuard 검사 적응증 및 중요 위험 정보

Cologuard 검사는 대변에서 특정 DNA 표지자와 혈액을 검출하여 대장암에 대한 위험이 평균 수준인 45세 이상의 성인을 선별 검사하기 위한 것입니다. 선종이 있거나 염증성 장 질환과 특정 유전 증후군이 있거나 대장암의 개인 병력 또는 가족 병력이 있는 경우 사용하지 마십시오. Cologuard 검사는 고위험 환자의 대장내시경을 대체하지 않습니다. 45~49세 성인에서의 Cologuard 검사 성능은 50세 이상 환자에 대한 대규모 임상 연구를 기반으로 추정됩니다. Cologuard 검사 결과는 주의해서 해석해야 합니다. 양성 검사 결과가 암의 존재를 확인하는 것은 아닙니다. 검사 결과가 양성인 환자는 대장내시경 검사를 받아야 합니다. 음성 검사 결과는 암이 없음을 확인하지 않습니다. 검사 결과가 음성인 환자는 언제 다시 검사를 받아야 하는지 의사와 상의해야 합니다. 위양성과 위음성 결과가 발생할 수 있습니다. 임상 연구에서 암이 없는 사람의 13%에서 양성 결과(위양성)가 나왔고 암이 있는 사람의 8%에서 음성 결과(위음성)가 나왔습니다. Rx only.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
[ExactSciences.com](https://www.ExactSciences.com) | [ExactLabs.com](https://www.ExactLabs.com) | 1-844-870-8870

Cologuard는 Exact Sciences Corporation의 등록 상표입니다.

© 2024 Exact Sciences Corporation. 모든 권한 보유. M-US-CG-03667 2024년 7월.

 **cologuard**
by EXACT SCIENCES