

Sàng lọc ung thư đại trực tràng bằng xét nghiệm Cologuard

Xét nghiệm Cologuard® là gì?

Xét nghiệm Cologuard tìm các dấu hiệu của ung thư đại tràng trong phân.

Xét nghiệm Cologuard là một xét nghiệm sàng lọc không xâm lấn. Để sử dụng tại nhà một cách nhanh và dễ dàng.

Bộ dụng cụ lấy mẫu Cologuard bao gồm những gì?

Quý vị sẽ nhận được bộ dụng cụ lấy mẫu Cologuard qua đường bưu điện.



Tôi sử dụng bộ dụng cụ lấy mẫu Cologuard như thế nào?

- Mở bộ dụng cụ lấy mẫu của quý vị ra. Đọc tờ Hướng dẫn dành cho Bệnh nhân đi kèm ở bên trong (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).
 - Đặt lời nhắc theo lịch trong điện thoại để tiến hành sử dụng bộ dụng cụ lấy mẫu trong vòng 2 tuần
- Lấy mẫu phẩm khi quý vị có thể gửi bộ dụng cụ lấy mẫu cho UPS® **trong cùng ngày** hoặc **vào ngày hôm sau**.
- Gửi mẫu phẩm của quý vị trong cùng ngày hoặc vào ngày sau ngày quý vị lấy mẫu.
 - Lên lịch lấy hàng miễn phí với UPS (**1-844-870-8870** hoặc **Cologuard.com/UPS**).
 - Mang bộ dụng cụ lấy mẫu của quý vị đến UPS. Tìm các địa điểm và giờ làm việc tại **Cologuard.com/UPS**. Một số địa điểm đóng cửa vào Chủ nhật hoặc ngày lễ
- Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ nhận được kết quả của quý vị khoảng 2 tuần sau khi Exact Sciences Laboratories nhận được mẫu phẩm của quý vị.

Xem Video về **Cách sử dụng Cologuard** (bằng 13 ngôn ngữ)
Quét mã QR hoặc truy cập **Cologuard.com/use**



Quý vị có câu hỏi?

Vui lòng truy cập **Cologuard.com** hoặc gọi cho Exact Sciences Laboratories theo số **1-844-870-8870**.

Các Chỉ định Xét nghiệm Cologuard và Thông tin Quan trọng về Nguy cơ

Xét nghiệm Cologuard nhằm mục đích sàng lọc những người trưởng thành từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng ở mức trung bình bằng cách phát hiện một số chất chỉ điểm DNA và máu trong phân. Không sử dụng bộ xét nghiệm nếu quý vị bị u tuyến, bệnh viêm ruột và một số hội chứng di truyền hoặc cá nhân hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Xét nghiệm Cologuard không phải là phương pháp thay thế cho nội soi đại tràng ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Hiệu quả của xét nghiệm Cologuard ở người trưởng thành trong độ tuổi 45-49 được ước tính dựa trên một nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn trên các bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên. Kết quả xét nghiệm Cologuard nên được diễn giải một cách thận trọng. Kết quả xét nghiệm dương tính không xác nhận việc có bệnh ung thư. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính nên được giới thiệu thực hiện nội soi đại tràng. Kết quả xét nghiệm âm tính không xác nhận việc không có bệnh ung thư. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính nên thảo luận với bác sĩ nếu cần xét nghiệm lại. Có thể xảy ra trường hợp kết quả dương tính giả và âm tính giả. Trong một nghiên cứu lâm sàng, 13% bệnh nhân không mắc ung thư được kết quả dương tính (dương tính giả) và 8% bệnh nhân mắc ung thư nhận được kết quả âm tính (âm tính giả). Rx only.