

فحص سرطان القولون باستخدام Cologuard® اختبار

يتم تغطية اختبار Cologuard بواسطة Medicare ومعظم شركات التأمين الكبرى.

على الصعيد الوطني، أكثر من 96% من مرضى Cologuard لا يتحملون أي تكاليف إضافية للفحص*1

96%

يدفع معظم المرضى المؤمن عليهم \$0 مقابل اختبار Cologuard*1

\$0

تعرف على المزيد من Cologuard.com/insurance أو اتصل على الرقم 1-844-870-8870. يُمكننا مساعدتك على طرح الأسئلة المناسبة على شركة التأمين الخاصة بك.




مقطع فيديو يوضح كيفية الاستخدام:
Cologuard.com/use

تغطي معظم شركات التأمين تكلفة إجراء منظار القولون الخاص بالمتابعة بعد الحصول على نتيجة إيجابية في فحص Cologuard.†3,2

اختبار Cologuard سهل الاستخدام في المنزل

التعليمات التفصيلية الكاملة موجودة في علبة Cologuard


- استخدم اختبار Cologuard عندما تكون جاهزًا.
- ضع حاوية العينة البيضاء على المرحاض.
- اجلس على المرحاض.

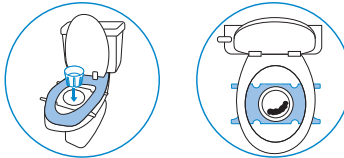

اجلس

1


- تبرز في حاوية العينة البيضاء.
- قم بكشط البراز الخاص بك باستخدام عصا ثم ضعه مرة أخرى في الأنبوب من المجموعة.

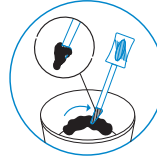

الكشط

2


- املاً حاوية العينة بمادة حافظة سائلة.
- أغلق الحاوية الكبيرة وعينتك بداخلها.

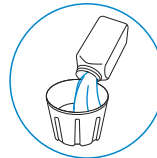

نقع وختم

3

- املاً كلا المصقين.
- أعد هذا الطقم إلى شركة Exact Sciences من خلال UPS®.

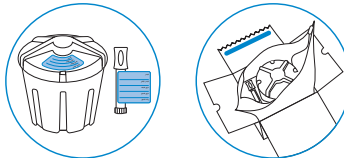

الملصق والشحن

4

أعد عينتك مجاناً



1. حدد موعدًا لاستلام العينة بواسطة UPS من خلال Cologuard.com/UPS أو اتصل على الرقم 1-844-870-8870

2. انقل مجموعتك إلى UPS. يُمكنك البحث عن المتاجر المحلية وساعات التسليم على Cologuard.com/UPS

*تقييم حديث أجرته Exact Sciences بناءً على محفوظات فواتير المرضى. †بالنسبة إلى معظم المرضى، سيسري ذلك في 1 يناير 2023، ولا ينطبق على الخطط التجارية ذات الحالة المعفاة. 3,2

يبحث اختبار Cologuard عن الحمض النووي المتغير والدم (علامات السرطان) في البراز⁴



يُمكنك العثور على المزيد من المعلومات ومقاطع الفيديو على:
Cologuard.com/UnderstandingResults

حقوق عيظا والنشر © العلم و 2025 فحمظة حل الصا Exact Sciences Corporation. قودا عيمحق وفحمظة. M-US-CG-05291 Arabic May 2025