

Detección del cáncer de colon con la prueba Cologuard®

La prueba Cologuard está **cubierta** por Medicare y la mayoría de las aseguradoras.

\$0 La mayoría de los pacientes asegurados pagan **\$0** por la prueba Cologuard.^{1*}

96 % A escala nacional, más del **96 %** de los pacientes que usan Cologuard no tienen que pagar de su bolsillo para hacerse la prueba de detección.^{1*}



Obtenga más información en Cologuard.com/insurance o llame al **1-844-870-8870**.

Podemos ayudarle a hacerle las preguntas correctas a su compañía de seguro.

La mayoría de las aseguradoras **cubren una colonoscopia de seguimiento** después de una prueba de detección Cologuard positiva.^{2,3†}




Video **instructivo:**
Cologuard.com/use

La prueba Cologuard es **fácil** de usar en el hogar


Las instrucciones detalladas completas se encuentran en la caja de Cologuard

1 SIÉNTESE

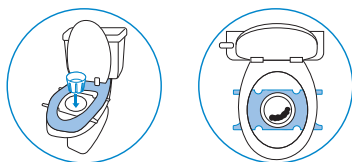


- Utilice la prueba Cologuard cuando esté listo.
- Coloque el recipiente blanco para muestras en el inodoro.
- Siéntese en el inodoro.

2 RASPE

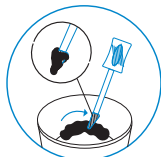


- Defeque en el recipiente blanco para muestras.
- Raspe la materia fecal (caca) con el palillo y vuelva a colocarlo en el tubo del kit.

3 REMOJE Y SELLE

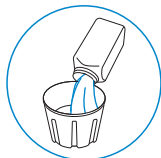

- Llene el recipiente para muestras con el conservante líquido.
- Cierre el recipiente grande con la muestra adentro.

4 ETIQUETE Y ENVÍE

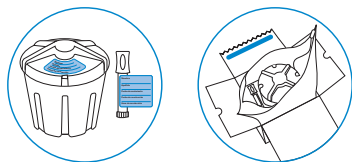

- Llene ambas etiquetas.
- Devuelva este kit a Exact Sciences a través de UPS®.




Envíe su muestra sin cargo

1. Programe la recogida de UPS en Cologuard.com/UPS o llame al **1-844-870-8870**
2. Lleve su kit a UPS. Encuentre tiendas locales y horarios de entrega en Cologuard.com/UPS

* Estimación reciente de Exact Sciences basada en la facturación histórica de pacientes.

† Para la mayoría de los pacientes, esto entró en vigencia el 1 de enero de 2023 y no se aplica a los planes comerciales con estado de exención.^{2,3}

Los resultados de su prueba Cologuard®

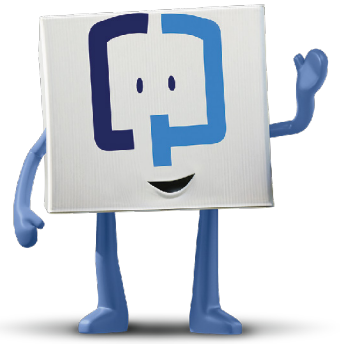

Su proveedor de atención médica debería obtener sus resultados aproximadamente entre 8 y 10 días después de que Exact Sciences reciba su muestra.

En la prueba Cologuard se busca **ADN alterado** y **sangre** (signos de cáncer) en la materia fecal.⁴

- Un resultado negativo significa que en la prueba Cologuard no se encontraron posibles signos de cáncer. Lo más probable es que no tenga cáncer colorrectal.⁴
- +** Un resultado positivo significa que en la prueba Cologuard se encontraron posibles signos de cáncer. Un resultado positivo **no** significa que tenga cáncer.⁴ Programe una cita de seguimiento con su proveedor de atención médica.

Algunas personas obtienen resultados falsos (incorrectos) positivos y negativos. Siempre consulte con su proveedor de atención médica sobre los pasos siguientes para la detección.⁴

Encuentre más información y videos en:
Cologuard.com/UnderstandingResults

Indicaciones e información importante sobre riesgos

Las pruebas Cologuard® y Cologuard Plus® están previstas para evaluar a adultos de 45 años o más que tengan un riesgo promedio de cáncer colorrectal, mediante la detección de ciertos marcadores de ADN y sangre en la materia fecal. No utilice los productos Cologuard si ha tenido antecedentes personales de cáncer colorrectal o pólipos precancerosos, si tiene enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes familiares de cáncer colorrectal o ciertos síndromes hereditarios, o un resultado positivo mediante otro método de detección del cáncer de colon dentro del intervalo de evaluación recomendado para esa prueba. Hable con su proveedor de atención médica si alguna de estas situaciones se aplica a usted.

Los resultados de Cologuard deben interpretarse con precaución. Un resultado positivo de la prueba no confirma la presencia de cáncer. Los pacientes con un resultado positivo en la prueba deben referirse para una colonoscopia. Un resultado negativo de la prueba no confirma la ausencia de cáncer. Los pacientes con un resultado negativo en la prueba deben hablar con su médico para saber cuándo necesitan volver a hacerse la prueba. Pueden producirse falsos positivos y falsos negativos. Rx only.

Referencias: 1. Internal Data on File. Exact Sciences. 2. FAQs about Affordable Care Act Implementation Part 51, Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation. US Department of Health & Human Services. Published January 10, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.hhs.gov/guidance/document/faqs-about-affordable-care-act-implementation-part-51>. 3. CMS. Calendar year (CY) 2023 Medicare physician fee schedule final rule. Published November 1, 2022. Accessed March 30, 2026. <https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2023-medicare-physician-fee-schedule-final-rule>. 4. Exact Sciences. 2026. Cologuard Patient Brochure.

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard y Exact Sciences son marcas comerciales registradas de Exact Sciences Corporation.
Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2026 Exact Sciences Corporation. Todos los derechos reservados. M-US-CG-05164_Spanish_April 2026

 **cologuard**®
by EXACT SCIENCES