

Cologuard® 檢測簡便易用，可在家自行檢測。現在，Exact Sciences 讓接受 Cologuard 檢測更便利了。

為支援華裔病患族群，Exact Sciences 現在有普通話和廣東話服務代表可為您解答所有疑問！



如何進行檢測



如何寄回套組或安排到家取件



結果



保險



如果在閱讀以下資訊後，您仍有疑問，請致電客戶服務部，電話 1-844-870-8870，由普通話或廣東話客戶服務團隊成員解答您的所有疑問。


使用 Cologuard 檢測篩檢大腸癌

Cologuard 包裝盒內有完整的詳細說明




如何使用影片：
Cologuard.com/use

1 坐便

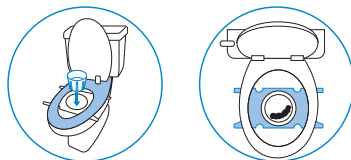


- 準備大便時，取 Cologuard 檢測套組。
- 將白色檢體採集容器放在坐便器內。
- 坐在坐便器上。

2 刮取

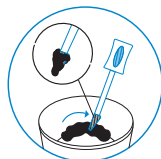


- 便入白色檢體採集容器。
- 用採集棒刮取適量糞便，然後放回到套組的試管內。

3 浸泡和密封

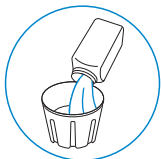

- 在檢體採集容器內注入防腐液。
- 蓋好內有檢體的大採集容器。

4 填寫標籤和寄回

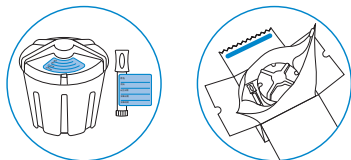

- 把兩個標籤皆填好。
- 使用 UPS® 將此套組寄回 Exact Sciences。




寄回檢體是免費的

1. 前往 Cologuard.com/UPS 線上或致電 1-844-870-8870 安排 UPS 到家取件
2. 把套組拿去 UPS 寄。要查附近的收件據點和營業時間，請上 Cologuard.com/UPS

您的 Cologuard 檢測結果

您的醫療保健提供者將在 **Exact Sciences** 收到您的檢體後約 2 週內得出結果。

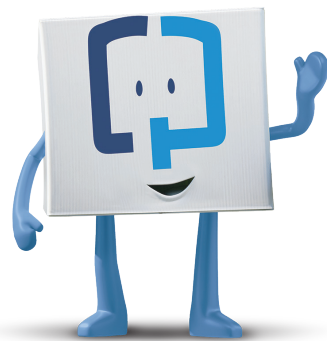

Cologuard 檢測是篩檢您的糞便是否有異常變化的 DNA 和血液（癌症的徵象）¹



陰性結果表示 Cologuard 檢測沒有發現可能的癌症徵象。說明您很有可能沒有患大腸直腸癌。¹



陽性結果表示 Cologuard 檢測發現可能存在癌症的徵象。陽性結果並不表示您患有癌症。¹請與您的醫療保健提供者安排追蹤約診。

有些人的陽性和陰性結果是偽（不正確）陽性和陰性。務必向您的醫療保健提供者詢問接下來的篩檢步驟。¹

如需更多資訊和影片，請瀏覽：
Cologuard.com/UnderstandingResults

適用範圍及重要風險資訊

Cologuard 檢測旨在定性檢測大腸直腸腫瘤相關 DNA 標記，以及人類糞便中是否存在隱匿性血紅素。陽性結果可能表示存在大腸直腸癌 (CRC) 或晚期腺瘤 (AA)，之後應進行大腸鏡檢查。Cologuard 檢測適用於篩檢 45 歲或以上，具典型平均 CRC 風險的成人，性別不限。Cologuard 檢測不能替代高風險族群所需的診斷性大腸鏡檢查或追蹤監視性大腸鏡檢查。

Cologuard 檢測不適用於高風險族群，包括有大腸直腸癌和腺瘤個人病史的病患，以及以下病患：過去 6 個月內曾使用另一種大腸直腸癌篩檢方法篩檢結果呈陽性；已確診患有與大腸直腸癌高風險相關的病症，例如 IBD、慢性潰瘍性結腸炎、克隆氏症；或有家族病史家族史或某些遺傳症候群。

Cologuard 檢測結果呈陽性應進一步接受大腸鏡檢查。Cologuard 檢測結果呈陰性並不保證不存在癌症或晚期腺瘤。檢測結果為陰性後，病患應定期以適合個別病患的方式繼續參加篩檢計劃。

偽陽性及偽陰性結果確有發生。一項臨床研究表明，13% 未患有大腸直腸癌或晚期腺瘤的病患出現陽性結果（偽陽性），8% 的癌症病患出現陰性結果（偽陰性）。臨床驗證研究的對象為 50 歲(含)以上的病患。Cologuard 檢測於 45–49 歲年齡層病患中之表現，係透過相近年齡層次族群分析推估而得。

使用 Cologuard 檢測做重複檢測之表現尚未評估或確立。Rx only.

參考文獻：1. Exact Sciences. 2022. Cologuard 病患摺頁冊。

EXACT SCIENCES CORPORATION | 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard 和 Exact Sciences 是 Exact Sciences Corporation 的註冊商標。
所有其他商標皆為其各自所有者的財產。

© 2025 Exact Sciences Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。M-US-CG-06494-Chinese-LL-Traditional



**EXACT
SCIENCES.**