


Скрининг колоректального рака при помощи анализа Cologuard®

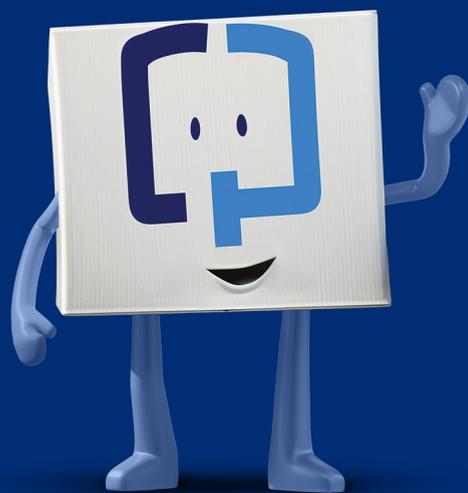


cologuard®
by EXACT SCIENCES

Анализ Cologuard проводится для скрининга людей в возрасте от 45 лет из группы среднего риска развития колоректального рака. Только по предписанию врача.

Важная информация о рисках приводится на обороте.

Возьмите под контроль свое здоровье, пройдя скрининг колоректального рака

Риску развития колоректального рака подвержены мужчины и женщины всех рас и национальностей¹

3-й

Это третий по распространенности вид рака среди мужчин и женщин. Считается, что этот рак очень легко предотвратить, но в то же время большинство людей полностью пренебрегают его профилактикой^{2,5}

45+

И поскольку в настоящее время растет заболеваемость колоректальным раком среди людей до 50 лет, Американское онкологическое общество рекомендует начинать скрининг в 45 лет³

90%

Помните об этой рекомендации. При обнаружении на ранней стадии колоректальный рак излечим у примерно 90%* пациентов⁴

Именно поэтому своевременный скрининг должен стать для вас частью обычного медосмотра!

*На основании данных о пятилетней выживаемости.

Что означают результаты анализа

Ваш врач предоставит вам результаты примерно через две недели после получения образца лабораторией

В ходе анализа Cologuard образец кала проверяют на наличие **измененной ДНК** и **крови**, поэтому результаты будут основываться именно на этих маркерах⁵

—

Отрицательный результат означает, что в анализе не были обнаружены эти потенциальные признаки заболевания. У вас, скорее всего, нет колоректального рака^{5,6}

+

Положительный результат будет означать, что эти потенциальные признаки были обнаружены. Важно знать, что положительный результат сам по себе **не** является диагнозом рака⁵

Не исключена возможность ложных отрицательных и положительных результатов. Обратитесь к врачу, чтобы обсудить ваши следующие действия⁵


Хотите узнать больше? Дополнительные сведения и полезные видео можно найти на странице Cologuard.com/UnderstandingResults

Анализ Cologuard прост в применении и доступен по цене

Анализ Cologuard оплачивается программой Medicare и большинством крупных страховых компаний. Большинству застрахованных лиц он обойдется в **\$0***⁶

В целом по стране более **94%** пациентов, сдавших анализ Cologuard, не пришлось доплачивать за скрининг из собственных средств*⁶

*Последняя оценка Exact Sciences, основанная на выставлении счетов пациентам за прошедшие периоды.

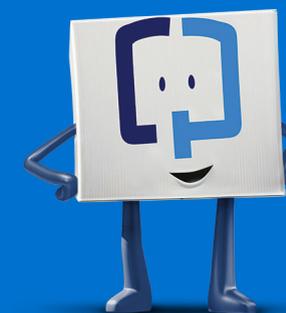

Дополнительную информацию о страховании можно найти на странице Cologuard.com/insurance

Мы поможем вам обратиться в страховую компанию и задать нужные вопросы. Позвоните нам по номеру **1-844-870-8870**



Оторвите эту памятку с инструкцией, как отправить комплект Cologuard на анализ,

и поместите ее в место, где обычно оставляете памятки: на зеркале или двери холодильника.



Позвоните по номеру **1-844-870-8870*** или обратитесь в чат на сайте **Cologuard.com**

Посмотрите видеоинструкцию по использованию на странице **Cologuard.com/use**

*Доступны услуги перевода на +200 языков

Просьба вернуть комплект не позднее этой даты:



Как пользоваться комплектом Cologuard



Получив свой комплект, распакуйте его и ознакомьтесь с прилагаемым Руководством для пациентов



Закрепите контейнер для сбора кала в держателе в унитазе



Произведите дефекацию в контейнер для сбора кала



Соберите образец в пробирку



Добавьте в контейнер для сбора кала консервант



Обязательно заполните обе этикетки



Осталось только передать посылку в UPS®. Читайте важную информацию об отправке образца на следующей странице.

Как отправить комплект Cologuard на анализ

Воспользуйтесь **предоплаченной этикеткой UPS®**, чтобы отправить комплект с образцом на анализ в лабораторию **Exact Sciences Laboratories** в день его забора или на следующий день

Убедитесь, что отправка не выпадает на воскресенье или праздничный день

Мы предлагаем два варианта бесплатной отправки образца.

Первый вариант.

Запланируйте вывоз посылки службой UPS на странице **Cologuard.com/UPS** или обратитесь за помощью по телефону **1-844-870-8870**

Второй вариант.

Передайте комплект в службу UPS. На странице **Cologuard.com/UPS** вы найдете информацию о местных отделениях и их часах приема посылок

Показания и важная информация о риске

Анализ Cologuard предназначен для скрининга людей в возрасте от 45 лет и старше из группы среднего риска развития колоректального рака. С его помощью образец кала проверяют на наличие определенных ДНК-маркеров и крови. Не использовать, если у вас были аденомы, если вы страдаете воспалительным заболеванием кишечника и определенными наследственными синдромами, а также при наличии колоректального рака в личном или семейном анамнезе. Cologuard не заменяет собой колоноскопию для пациентов в группе высокого риска. Оценка точности анализа Cologuard для людей в возрасте от 45 до 49 лет основана на крупном клиническом исследовании с участием пациентов от 50 лет.

Результаты анализа Cologuard следует интерпретировать с осторожностью. Положительный результат анализа не подтверждает наличие рака. Пациентов с положительным результатом следует направить на колоноскопию. Отрицательный результат анализа не подтверждает отсутствие рака. Пациенты с отрицательным результатом должны узнать у врача, когда им необходимо снова пройти анализ. Анализ может показать ложный положительный или отрицательный результат. В одном клиническом испытании 13% участников, не болевших раком, получили (ложный) положительный результат анализа, а 8% участников, больных раком, получили (ложный) отрицательный результат. Только по предписанию врача.

Справочная литература:

1. Henley SJ, Ward EM, Scott S, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, part I: national cancer statistics. *Cancer*. 2020;126(10):2225-2249.
2. National Cancer Institute. Genetics of colorectal cancer (PDQ®) - health professional version. Доступ 26 сентября 2022 г. <https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq>
3. Wolf AMD, Fonham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281.
4. National Cancer Institute. Cancer stat facts: colorectal cancer. Доступ 26 сентября 2022 г. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>
5. Exact Sciences. 2022. Cologuard Patient Brochure.
6. Exact Sciences. 2022. Неопубликованные данные.

EXACT
SCIENCES

 **cologuard®**
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard является зарегистрированным товарным знаком корпорации Exact Sciences Corporation. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

© 2022 Exact Sciences Corporation. Все права защищены.
M-US-CG-03798